Weiche Kontaktlinsen



i-SOFT

3-Monatslinsen



Mein Jahresvorrat an weichen Linsen. Pro Auge.

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch www.appenzeller-kontaktlinsen.ch



passt. Weiche 3-Monatslinsen

Klar und deutlich sehen. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger. Das garantiert die i-SOFT von Appenzeller Kontaktlinsen. Und das über drei Monate. Mehr nicht. Und auch nicht weniger.

Sollte die Kontaktlinse verloren gehen oder beschädigt sein, ist der Ersatz weniger kostspielig als bei Halbjahres- und Jahreslinsen. Ideal für Kunden also, die kein Risiko eingehen wollen. Und auf keinen Fall auf Qualitäts-Kontaktlinsen verzichten möchten.

→ i-SOFT Familie

i-SOFT

i-SOFT TD / TP

i-SOFT proASSIST

i-SOFT proASSIST TD / TP

i-SOFT Multi

i-SOFT Multi TD / TP

→ Tauschrhythmus

3 Monate

→ Geometrie der Vorderfläche

Sphärisch

Prismatisch stabilisierend Punktgravur in 0° und 180° Dynamisch stabilisierend Punktgravur in 0° und 180°

→ Geometrie der Rückfläche

- Sphärische oder torische Ausführung
- Zweikurvig, gemäss des Kornea-Skleral-Profils in verschiedenen Abflachungen erhältlich

Bezeichnung	Geometrie
1	leichte Randabflachung
2	normale Randabflachung (standard)
3	hohe Randabflachuna













Risikofaktor (für proASSIST Varianten) Moderat / High / Very High Moterial Material Manat Monat Mona																		
Durchmesser	→ Lieferprogram	m																
Durchmesser	Basiskurve (abhänaia	vom Du	ırchme	esser)							7.5 m	nm bis	s 9.2 m	nm in	0.1 mr	n Sch	ritten	
\$30.0 dpt in 0.25 dpt Schritter				,					13.3	mm /								
\$30.0 dpt in 0.25 dpt Schritter	Abflachung «AF»															1,	/2/3	
Achse (für torische Varianten) Addition (für multifokale Varianten) No.5 dpt bis 3.5 dpt in 0.25 dpt Schritter Risikofaktor (für proASSIST Varianten) Material Mat												± 3	30.0 d _l	pt in 0	.25 dp	ot Sch	ritten	
Addition (für multifokale Varianten) Risikofaktor (für proASSIST Varianten) Moderat / High / Very High Farbe Unisi Silikonhydrogel 50 Transparent / Blau GM Advance 49% Transparent / Blau Transparent Transpar	Zylinder (für torische \	ariante	n)							_	-0.5 dp			pt in 0	.25 dp	ot Sch	ritten	
Risikofaktor (für proASSIST Varianten) Materialia Material Mat											•			0° bis	180°	/ 1° Sc	hritte	
→ Materialien Material Farbe Unisil Silikonhydrogel 50 Transparent / Blau GM Advance 49% Transparent / Blau Contaflex 75% Transparent / Blau Contaflex 75% Transparent → Tauschfristen Lieferscheindatum +1 Monat Gutschrift mit Selbstbehalt Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate 50% Gutschrift → Garantie Lieferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift auf Bruch → Anpassempfehlung Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1 + rh2)/2 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 Affilitelwert (rh1 + rh2)/2									0.5 dpt bis 3.5 dpt in 0.25 dpt Schritten									
Material Farbe Unisil Silikonhydrogel 50 Transparent / Blau GM Advance 49% Transparent / Blau GM Advance 58% Transparent Contaflex 75% Transparent Lieferscheindatum +1 Monat Gutschrift mit Selbstbehalt Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate 50% Gutschrift → Garantie Lieferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift auf Bruch → Anpassempfehlung Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 49% GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rhl + rh2)/2 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 Af	Risikofaktor (für proAS	SIST Va	riante	n)									Mod	erat /	High	/ Very	' High	
Unisil Silikonhydrogel 50 Transparent / Blau GM Advance 49% Transparent / Blau Contaflex 75% Transparent → Tauschfristen Useferscheindatum +1 Monat Gutschrift mit Selbstbehalt Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate 50% Gutschrift → Garantie Useferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift auf Bruch → Anpassempfehlung Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1 + rh2)/2 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 Af	→ Materialien																	
GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Transparent / Blau Contaflex 75% Transparent → Tauschfristen Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate Formula in the selbstbehalt bis 1.5 Monate → Garantie Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum +1 Monat Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1 + rh2)/2 Transparent / Blau Transparent																		
GM Advance 58% Contaflex 75% Transparent → Tauschfristen Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate Transparent Gutschrift mit Selbstbehalt Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate Town Gutschrift → Garantie Lieferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift auf Bruch Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1+ rh2)/2 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 Af Mittelwert (rh1+ rh2)/2		0																
Transparent → Tauschfristen Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate → Garantie Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift → Anpassempfehlung Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1 + rh2)/2 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 Af Mittelwert (rh1 + rh2)/2																		
 → Tauschfristen Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate → Garantie Lieferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift auf Bruch → Anpassempfehlung Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1+rh2)/2 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 Af Mittelwert (rh1+rh2)/2 														Tr				
Lieferscheindatum +1 Monat Lieferscheindatum > 1 Monat bis 1.5 Monate → Garantie Lieferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift → Anpassempfehlung Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1 + rh2)/2 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 AF	Contaflex 75%															ransp	arent	
Lieferscheindatum +1 Monat 100% Gutschrift auf Bruch → Anpassempfehlung Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1+rh2)/2 Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* Application (Mittelwert (rh1+rh2)/2) 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 Application (Phi+rh2)/2	Lieferscheindatum +1 Monat							Gutschrift mit Selbstbehalt 50% Gutschrift										
Materialien Unisil Silikonhydrogel 50* GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75% Hornhautradien Mittelwert (rh1+rh2)/2		Monat											1009	% Gut	schrif	t auf I	Bruch	
Mittelwert (rh1 + rh2)/2	Materialien Unisil Silikonhydrogel 5 GM Advance 49% GM Advance 58% Contaflex 75%	0*		740	750	7.60	7.70	7.80	7.00	9.00	9.10	8 20	9.30	9.40	9.50	9.40		
Klein 11.0-11.4 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 x x x x x x x x x x x AF2							7.70 X	7.80 x	7.90 X	8.00 x	8.10 x	8.20 x	8.50 x	8.40 x	8.50 x	8.60 x	AF 2	

7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.50 8.60 8.70

8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 9.00 9.10 AF 2

Durchmesser i-SOFT: Ø Kornea (HVID) +2.5 mm

11.5-12.1

>12.1

Kornea Ø (mm)

Medium

Gross

AF 2

^{*}Unisil 50: Basiskurve 0.1 bis 0.2 mm flacher als in Tabelle angegeben



KOMFORT UND SICHERHEIT

passt.

Was wir Ihnen für die Pflege von weichen Kontaktlinsen empfehlen:

Einzelprodukte oder als Set.

Konfiguriert nach Ihren Wünschen.

Kontaktlinsen sind nicht einfach ein Produkt. Kontaktlinsen sind ein Prozess, der mit Ihrer Beratung beginnt. Und mit der erfolgreichen Anpassung noch lange nicht abgeschlossen ist. Weil Kontaktlinsen aufgesetzt und abgenommen werden wollen. Und weil sie gereinigt und aufbewahrt werden müssen. Aus diesem Grund liefern wir Ihnen nicht nur Kontaktlinsen nach Mass, sondern auch Know-how nach Mass. Dazu gehört unser Professional Service, der mit Rat und Tat für Sie da ist. Und dazu gehören Pflegeprodukte und Zubehörartikel, die Ihren Kundinnen und Kunden ein grösstmögliches Mass an Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit schenken.

Reinigen und abspülen, desinfizieren und aufbewahren: Das ist die Abfolge. Und entsprechend bieten wir Ihnen exakt aufeinander abgestimmte Produkte exakt in der von Ihnen gewünschten Kombination an. Schön als Set – umhüllt von einer dünnen Klarsichtfolie, die sich ohne Schere oder anderes Werkzeug entfernen lässt.

Kombinationsbeispiele

- 1x Reiniger plus 1x Saline plus 1x Peroxid plus 1x Enzyme
- 1x Reiniger plus 1x Saline plus 1x All-in-One RGP

Wie gesagt: Auch jede andere Kombination ist möglich. Ganz wie Sie wünschen.

1. Reinigen

Täglich

2. Abspülen

Täglich

Appenzeller Kontaktlinsen® Reiniger

Reiniger auf Alkoholbasis

Für die tägliche Pflege von formstabilen (auch GP-plasmabeschichtet) sowie weichen Kontaktlinsen.

Appenzeller Kontaktlinsen® Saline

Kochsalzlösung als Aufsetzlösung

Für alle Arten von Kontaktlinsen – ausser Sklerallinsen – und für das Abspülen von weichen und formstabilen Kontaktlinsen. Sowohl nach dem Reinigen der Linsen als auch bevor die Linsen wieder auf das Auge gesetzt werden.







3. Desinfizieren und aufbewahren

Täglich

4. Proteinentfernung 1x wöchentlich

Appenzeller Kontaktlinsen® Peroxyd

Desinfektion und Neutralisation: 1 Stunde – fertig

Die Desinfizierung und Neutralisierung der Linsen lässt sich ganz schnell bewerkstelligen. Und ganz einfach. Und 100% perfekt. Appenzeller Kontaktlinsen macht es möglich: mit diesem Peroxidsystem. Für herkömmliche weiche Linsen, Austauschlinsen und harte und gasdurchlässige Linsen (RGP-Linsen).

Appenzeller Kontaktlinsen® All-in-One RGP

Desinfektionsmittel

Für alle, die sich nicht für das Peroxidsystem und seine aussergewöhnlich rasche Wirkung entscheiden (siehe Spalte links): All-in-One RGP – die Kombilösung für sauerstoffdurchlässige, harte Linsen.

Appenzeller Kontaktlinsen® Enzyme

Intensivreinigung

Tag für Tag lagern sich Proteine auf den Linsen ab. Zusätzlich zur täglichen Neutralisation der Linsen ist wöchentlich eine Proteinentfernung nötig. Wenn das Peroxidsystem verwendet wird.









Kleine Kunststoffschalen...

passt.

Herr Feinbloom war's. Der Optiker verwendete als erster PMMA für die Linsenherstellung. Das war in den 1930-er Jahren. Seither hat sich für Millionen von Menschen dank der kleinen Kunststoffschalen ein grosses Fenster zur Welt aufgetan.

Auch wir betreiben sehr grossen Aufwand für die Forschung und Entwicklung.
Damit unsere Kontaktlinsen stets den neusten Möglichkeiten der Technik entsprechen

Unser Professional Service berät Sie kompetent, persönlich und geduldig. Für Antworten auf jede Frage-und damit Sie in jedem Fall die richtige Kontaktlinse erhalten.

i-SOFT



3-MonatslinsenMein Jahresvorrat an weichen Linsen.
Pro Auge.

Personnelle



Einstärken – Multifokal – Digitaler Lifestyle Meine Linse. So einzigartig wie mein Fingerabdruck.

Excellent AS Excellent MK



Einstärken – Multifokal – Bifokal Klassisch, praktisch, excellent: Auf diese Linse ist Verlass

. 1-MAPAS



Einstärken – Multifokal – Bifokal High-Tech für meinen Alltag: Jeder Situation gewachsen.

...grosses Fenster zur Welt.



i-NIGHT



Orthokeratologie auf höchstem Niveau Nachts tragen - tagsüber sehen: Ohne Brille, ohne Linsen.

Personnelle-KK



Keratokonus Kontaktlinsen Hoher Konusgrad, hoher Anspruch passgenau wie angegossen.

i-MAP



Anpassung bei irregulärer Kornea Passt auch dann, wenn keine andere mehr passt.

. 1-MATRIX



Sklerallinsen Verletzte Hornhaut, Keratokonus oder Keratoplastik? Passt trotzdem.

*pro*ASSIST



Professionelle Unterstützung bei progressiver Myopie Intelligente Linsen statt dicke Gläser.



passt.

Appenzeller Kontaktlinsen AC Hauptstrasse 22 CH-9042 Speicher AR Appenzeller Kontaktlinsen AC Kemptener Strasse 8 D-88131 Lindau Talafon + 40 60 332 062 31 Appenzeller Kontaktlinsen AG Postfach 29 A-6973 Höchst Telefon +43 72 088 16 97

nfo@appenzeller-kontaktlinsen.ch www.appenzeller-kontaktlinsen.ch

10 Punkte Was für Appenzeller Kontaktlinsen spricht.

→ Anpassungserfolg

Wir unternehmen alles, um Ihre Wünsche und Vorstellungen zu verstehen. Damit Ihre Anpassung ein volle Erfolg wird – für Sie und Ihre Kunden

→ Technikvorsprung

Wir betreiben sehr grossen Aufwand für die Forschung und Entwicklung. Damit unsere Kontaktlinsen stets den neusten Möglichkeiter der Technik entsprechen.

→ Swiss made

Wir stellen höchste Ansprüche an die Fertigungsqualität unserer Linsen. Damit unsere Kontaktlinsen Ihren ebenso hohen Erwartungen an Swiss made entsprechen.

→ Reproduzierbarkeit

Wir haben die permanente Fortsetzung Ihrer Kundenbeziehunger im Auge. Damit Sie bei jeder Nachbestellung exakt dieselbe Linse wie zuvor geliefert bekommen.

→ Offene Ohren

Unser Professional Service berat Sie kompetent, persönlich und geduldig Für Antworten auf jede Frage – und damit Sie in jedem Fall die richtige Kontaktlinse erhalten.

ightarrow Massarbeit

Wir stellen jede Kontaktlinse individuell auf Bestellung für Sie her. Damit sie 100% Ihren Vorgaben entspricht.

→ Tauschrecht

Wir liefern Ihnen unsere Kontaktnsen wahlweise mit oder ohne Tauschecht. Damit Sie die für Ihre Bedürfnise optimale Wahl treffen können. Die Option «mit Tauschrecht» gibt Ihnen inanzielle Sicherheit: Sie können nachräglich eine andere Linse bestellen. un Sie dies innerhalb der Tauschfrist, wezahlen Sie nur einen Selbstbehalt. Massgebend für die Frist ist das Datum unf dem Lieferschein.

- -Weiche Kontaktlinser
- i-SOFT 3 Monatslinsen: 1 Monat
- Halbighreslinsen: 2 Mongte
- Jahreslinsen: 3 Monate
- -Formstabile Kontaktlinsen: 3 Monat

> Preisvorteil

wir bieten innen speziell gunstige Zahlungskonditionen an. Damit Sie in Form von Vorauszahlungen zusätzlich auf die Rechnung kommen. Die aktuellen Konditionen teilen wir Ihnen auf Wunsch gerne mit.

→ Garantieumfana

Wir stehen für unsere Arbeit gerade. Damit Sie sich mit Garantie auf uns und unsere Kontaktlinsen verlassen kännen Garantiedquer:

- i-SOFT 3 Monatslinsen: 1 Monat
- Halbjahreslinsen: 2 Monate
- -Jahreslinsen: 3 Monate
- -Bruch einer Linse: Senden Sie uns die defekte Linse innerhalb der Garantiedauer und wir ersetzen sie. Auf Ihrer nächsten Rechnung nehmen wir eine entsprechende Gutschrift vor. Massgebend für die Garantiezeit ist das Datum auf dem Lieferschein.

→ Langfristige Optik

Wir streben dauerhafte Geschäftsbeziehungen mit Ihnen an. Damit auch Sie umgekehrt auf lange Sicht auf uns zählen können.

